


Justering av låshake

Har du problem med att öppna och stänga låshaken på din Eloflex? Vill du göra den lättare eller kanske trögare att låsa? Genom att spänna eller släppa de två fjädrarna vid sidan av låshaken kan du enkelt justera. Se bilden nedan.

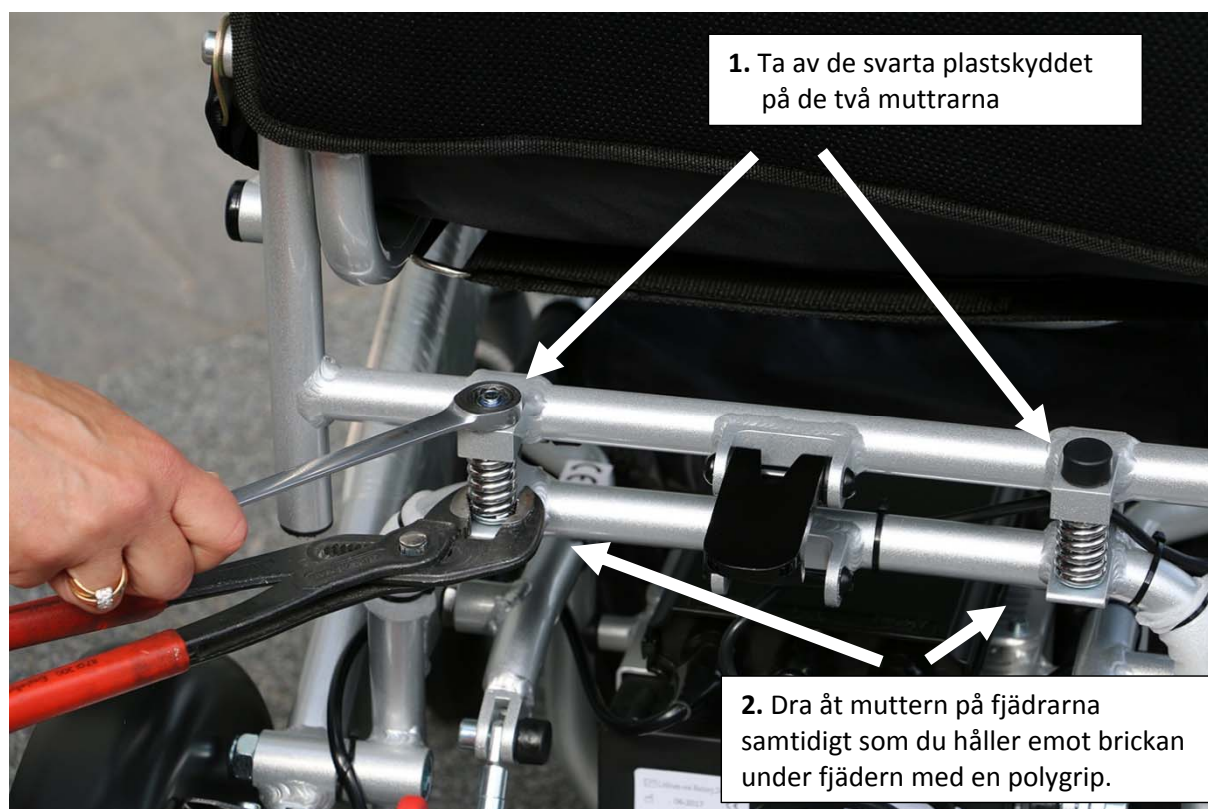

Viktigt:

Det är viktigt att låshaken på din Eloflex går trögt att dra upp och ner. Den skall gå så trögt att den kan stå rakt ut av sig själv som på bilden ovan. Detta är viktigt för att låshaken skall stanna i sin låsta position även om fjädrarna trycks ihop. För att göra din låshake trögare behöver du bara dra åt fästet genom de två insexskruvarna som håller låshaken på plats.

Se bilden till höger.

