

BRUKSANVISNING

ELOFLEX H

Les gjennom hele denne dokumentasjon før du bruker din Eloflex for å være sikker på at du bruker den på en forsvarlig måte, som ikke skader deg, omgivelsene eller din rullestol.



EL&FLEX

Takk og lykke til!

Takk for at du valgte en Eloflex som ditt hjelpemiddel. Det betyr mye for oss ettersom vår visjon er å gjøre menneskers hverdag litt enklere og gi mennesker med bevegelseshemming litt større frihet. Vi håper du erfarer begge deler med din Eloflex.

Vi tror du kommer til å få mye glede av din nye rullestol. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom hele denne dokumentasjonen før du tar i bruk din Eloflex for første gang. Vi anbefaler også at du trener på å kjøre din Eloflex på en stor åpen plass før du bruker den i andre sammenhenger.

Eloflex elektrisk rullestol er konstruert for brukere med mange ulike behov. Beslutningen om hvorvidt Eloflex egner for brukeren, tas alltid av terapeut og eller selger sammen med brukeren selv. Eloflex påtar seg ikke ansvar i de tilfellene der den elektriske rullestolen ikke er tilpasset brukerens behov.

En Eloflex skal i utgangspunktet brukes i sitt standard oppsett. Dersom rullestolen må tilpasses eller endres på noe vis, kan dette kun utføres av forhandler, produsent eller hjelpemiddelsentral. Vær oppmerksom på at skader og feil som oppstår på grunn av at bruksanvisningen ikke har blitt fulgt eller på grunn av dårlig vedlikehold, ikke omfattes av garantien.

Lykke til med din nye Eloflex..

Kjør forsiktig!



Innholdsfortegnelse	Side		Side
Beregnet bruk	3	Sikkerhetsbelte	9
Slå opp	4	Justering av korsryggstøtte	10
Legge sammen	5	Justere ryggen	10
Installere joystick	6	Justering av låsemekanismen	11
Felle ned joysticken	6	Transport og oppbevaring	11
Ladeinstruksjoner	7	Kontrollpanel	12
Manuell kjøring	7	Naviger i menyene	13
Juster armlene	8	Kjøreanvisninger	14-15
Fotbrettet	8	Sikkerhetsanvisninger	16-17
Styrhåndtaket	9	Tekniske data	18
Tippsikring	9	Kontakt	18

Beregnet bruk

Typeklassifisering og beregnet bruk

Eloflex elektrisk rullestol er utviklet for personer som har problemer med å gå eller ikke kan gå, men som har forutsetningene til å kjøre en elektrisk rullestol.

Eloflex elektrisk rullestol er tilstrekkelig kompakt og smidig for innendørsbruk, men stolen kan også benyttes utendørs. I kapitlet «Tekniske data» lengst bak i dette dokumentet finnes opplysninger om hastighet, svingradius, rekkevidde, maksimal stigning, maksimal brukervekt osv. Vi oppfordrer deg til å lese all sikkerhetsinformasjon i kapitlet «Sikkerhetsinformasjon» i dette dokumentet.

Eloflex er testet og godkjent i henhold til EN12184:2014 - klasse B (innendørs og utendørs bruk). Eloflex er også godkjent i henhold til ISO-7176, IEC60601 og batteriene er godkjent i henhold til UN38.3.

Eloflex elektriske rullestoler oppfyller gjeldende krav i EU-forordningen (2017/745), Medical Device Regulation (MDR), som sikrer sikkerheten og ytelsen til medisinsk utstyr. Produktet oppfyller dermed kravene i EC-direktivene for medisinsk utstyr, 93/42 / EEC og 22007/47 / EC.

Klasse 1 samsvarsvurdering / CE-merking er utstedt i henhold til Medical Devices Directive 93/42 EEC / MPG (Medical Devices Act) og gjelder kun for hele produktet. CE-merkingen blir ugyldig hvis du bruker reservekomponenter eller tilbehør som ikke er godkjent for dette produktet.

Behov

Hensikten med Eloflex er å gi de med en skade eller et funksjonshinder nye muligheter, derfor anbefales Eloflex i følgende omstendigheter:

- Hvis brukeren har begrensede eller sterkt begrensede muligheter for å gå og forflytte seg over en gitt avstand
- Om det er behov for et hjelpemiddel for å komme seg ut i frisk luft, besøke venner eller besøke andre steder som inngår i hverdagslivet vårt
- Hvis brukere har vanskeligheter for å delta på hverdagsaktiviteter og eller jobb pga sin funksjonshemming

Eloflex fungerer godt både innendørs og utendørs på fast underlag.

Tilbehør

Lader og en veske med verktøy følger med produktet ved levering

Brukervennlighet

Bruk Eloflex kun når rullestolen er i full funksjonell stand. Hvis du ikke gjør det, risikere du å utsette deg selv og andre for fare. Denne lista inneholder noen situasjoner som kan påvirke brukervennligheten til Eloflex. Vi tar forbehold om at det finnes flere situasjoner som ikke er listet opp her.

- Anvend ikke rullestolen hvis batteriene er defekte eller deformerte
- Anvend ikke rullestolen om motoren er defekt eller det er ulyd i motoren
- Anvend ikke rullestolen om det tyder på feil på bremsefunksjonen
- Kontakt din hjelpemiddelsentral hvis dekkene er utslitt
- Kontakt din hjelpemiddelsentral hvis du oppdager skade på hoftebeltet, armlene, ryggtrekk, joystick eller en annen del av stolen
- Kontakt din hjelpemiddelsentral hvis du oppdager skade på elektronikk (kabler, batteri eller lader osv.)

Produsentgaranti

Eloflex garanti erstatter ødelagte deler hvis skaden ikke er forårsaket av brukeren. Garantien dekker ikke skade forårsaket av eksterne forhold, slik som tyveri, feilaktig bruk, lynnedslag og modifikasjoner.

Levetid

Forventet levetid på en Eloflex er 5 år. Produktets levetid er påvirkes i stor grad av hvordan en håndteres og ivaretas. En Eloflex kan ha betydelig lengre levetid om man vedlikeholder den i linje med informasjon som gis i dette dokument.

Sikkerhetsforskrifter og risiko

LES IJENNOM KJØREANVISNING OG SIKKERHETSFORSKRIFTER, FRA SIDE 11, NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE DIN ELOFLEX.



Slå opp og legge sammen


Slå opp

1. Still den sammenfoldede stolen oppreist og fold ut fotplaten. Bilde 1.
2. Grip håndtaket på baksiden av ryggstøtten og dra bakover. Samtidig hold imot med den andre hånden på setedelen. Bilde 2.
3. Lukk låsehaken. Bilde 3.
4. Fold ut tippesikringene ved å trykke på knappen og deretter svinge ut tippesikringen. Bilde 4.
5. Hev armlenene til ønsket høyde. Bilde 5.



VIKTIG!

Det er veldig viktig at du alltid stenger låsemekanismen før du bruker din Eloflex.

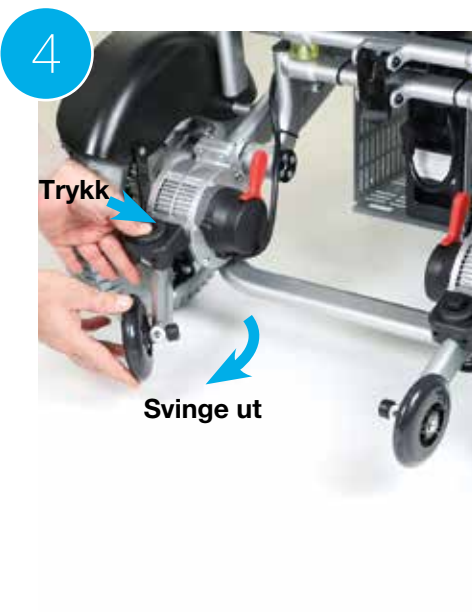

Legge sammen

1. Senk ned armlenene. Bilde 1.
2. Fold inn tippsikringene ved å trykke på knappen og deretter svinge dem innover. Bilde 2.
3. Åpne låsehaken. Bilde 3.
4. Ta tak i håndtaket bak på ryggstøtten og trykk fremover. Samtidig, hold imot med den andre hånden på setet. Bilde 4.
5. Fold inn fotplaten. Bilde 5.



Les mer...
... om hvordan du justerer
armenene på side 8.



Installere joystick

Steg 1

Monter joysticken i røret under armlene og skru igjen skruen til joysticken sitter fast.



Steg 2

Sett sammen kabelkontaktene og vri forsiktig til stiften går i hullet og sporene i de 2 kontaktene går sammen.

Deretter skrues hylsene på kontaktene sammen.



VIKTIG!

Vær forsiktig når du skrur kontaktene sammen slik at de ikke skades eller stiftene bøyes.

Felle ned joysticken

Det smarte joystickfestet gir deg mulighet til å raskt felle ned joysticken uten å måtte fjerne den fra festet. Dette gjør det mulig å komme nærmere bordkanten når man trenger det.

1. Løfte låsespaken for å løsne joysticken.
2. Dra joysticken forsiktig fremover. Deretter kan joysticken henge rett ned.



Ladeinstruksjon

Slik lader du

Skru alltid av Eloflex før du setter i ladekabelen. Koble in laderen i uttaket på joystickens fremre side. Vær nøye med at kontaktenes posisjon stemmer med hverandre. Sett deretter ladekontakt i vegguttaket. Lading indikeres med en lampe på laderen. Rød lampe betyr at lading pågår.

Etter cirka tre timer er batteriene 90% ladet. Stolen kan nå anvendes igjen. Etter 5-8 timer blir lampen på laderen grønn og batteriene er ladet 100%. Under ladingen kan ladeadapteret bli varmt, dette er helt normalt.

For maksimal levelengde på batteri bør lading skje ca i ca 5 timer når batteri-indikator viser at det er 1/3 igjen av kapasiteten. Batteriene tar ikke skade av å vedlikehold-lades. Vi anbefaler at du tar ut ladekontakten når ladingen er ferdig.

Lading av batteri kan skje ned til -10 grader. Ved lading under lave temperaturer vil ikke batterien blir fulladet.



Anvender du din Eloflex i minusgrader påvirker dette kjørelengden. Ved temperaturer under -10 grader kan kjørelengde minskes med opptil 50%.

Mer info om batterier og lading finnes på våre nettsider.



VIKTIG!

Koble ALDRI laderen direkte i batteriet.

Manuell kjøring

Trykk frem de røde spakene på motorene (Se bilde) for å koble ifra de magnetiske bremsene. Når denne operasjonen er utført kan stolene kjøres manuelt.

Obs! Om brukeren skal anvende stolen på egenhånd må stolens magnetiske lås alltid være påkoblet.




VIKTIG!

Spark aldri på de røde spakene. Bruk kun håndkraft.

Juster armlene

For optimal sittekomfort kan du justere høyden på armlene.

1. Løsne først låsen ved å løfte inn låsespaken.
2. Hev eller senk armlenene ønsket høyde.
3. Senk låsespaken.

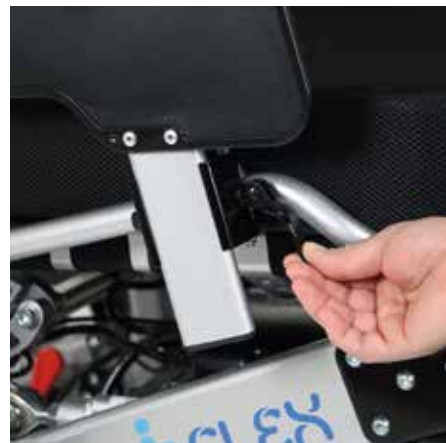

TIPS!

Det er også mulig å fjerne armlenene helt for enklere inn- og utstigning.

Fotbrettet

For enklere inn og utstigning kan fotbrettet felles opp slik bilde illustrerer.



Styrhåndtaket

Styrhåndtaket brukes til å rulle stolen manuelt. Styrhåndtaket kan foldes opp når det ikke er i bruk.



Tippsikring

Du kan også fold inn tippsikringene når stolen foldes sammen og under transport.

1. Trykk på knappen
2. Fold inn tippsikringen.

OBS! For optimal sikkerhet må anti-tippsystemet alltid være i utvidet stilling under kjøring.



Sikkerhetsbelte

For sikker kjøring anbefaler vi alltid å bruke sikkerhetsbeltet når stolen brukes.



Justering av korsryggstøtte

Modell H er utstyrt med en praktisk korsryggstøtte for optimal sittekomfort. For å justere korsryggstøtten, gjør du følgende:

- 1.** Løft fremre del av ryggputen.
- 2.** Løsne eller stram korsryggstøtten ved hjelp av borrelåsene til ønsket støtte.
- 3.** Hvis du ikke ønsker noen korsryggstøtte, kan du fjerne hele korsryggstøtten.



Justere ryggen

Dra opp ryggtrekket. Deretter kan du løsne eller stramme borrelås stroppene til du finner en behagelig sittestilling. Legg ryggtrekket tilbake og se til at det fester seg i borrelåsen.



Justering av låsemekanismen

Det er viktig at låsemekanismen på din Eloflex er motstandsdyktig når den trekkes opp og ned. Den skal være så motstandsdyktig at den kan stå rett opp av seg selv. Dette er viktig for at låsemekanismen skal forbli i sin låste posisjon selv når fjærene blir presset sammen.

For å gjøre låsemekanismen mer motstandsdyktig, trenger du bare stramme festet med de to umbrakoskruene som holder låsemekanismen på plass.



Det er viktig at låsemekanismen er motstandsdyktig når den trekkes opp og ned, slik at den ikke åpner seg når stolen brukes.



Transport og oppbevaring

- For å løfte stolen anbefales det at stolen felles sammen og settes på høy-kant. Deretter kan den løftes.
- En sammenlagt stol kan legges i bagasjerommet eller lagres hjemme.
- Om stolen ikke skal brukes en periode, anbefaler vi at den fulladdes før den settes bort.
- Stolen bør oppbevares innendørs i frostfritt, tørt og godt ventilert rom. Anbefalt romtemperatur for lagring er 0-30 grader.
- Ved transport i kollektivt, i taxi e.l skal Eloflex festes i de festepunkter som bildene viser. Husk at Eloflex ikke er godkjent som bilsete. Vi anbefaler derfor at brukere alltid flytter over i bilens eget sete.
- Kontakt flyselskapet før du transporterer rullestolen i et fly. Eloflex følger anbefalingene fra IATA.



Kontrollpanel



1

2

3

USB-kontakt

TIPS: Med hjelp av USB-kontakten på joysticken kan du lade din mobiltelefon.



Ladeport

Lys

1 Hastighetsindikator: Alle linjer hvite = maks hastighet.

2 Tripteller: Viser avstanden du har kjørt og nåværende hastighet.

3 Batteriinformasjon: Viser batterinivå. Når batteriene er fulladet, er alle stolpene hvite. Når batteriene blir ladet ut, synker antall stolper. Lad når tre stolper har sluknet.



Joystick: Kontroller stolens hastighet og retning.




Øke hastighet: Trykk for å øke stolens hastighet.



Strøm av/på: Trykk for å starte og slå av din Eloflex.



Redusere hastighet: Trykk for å redusere stolen hastighet.

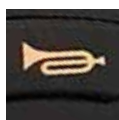

Horn: Trykk for å tiltrekke deg oppmerksomhet.



På/av lys: Trykk for å slå lyset på eller av.

Naviger i menyene

Endre innstillinger

Du kan endre stolens innstillinger, f.eks. språk, hornets lydstyrke og måleenheter.


1. Trykk på høyre flerfunksjonsknapp for å gå til innstillingene. Det vises en liste med flere alternativer.



2. Rull opp og ned med hastighetsknappene i flervalgslisten.



3. Velg funksjon med høyre flerfunksjonsknapp (Enter) eller gå tilbake ett trinn med venstre flerfunksjonsknapp (Return).

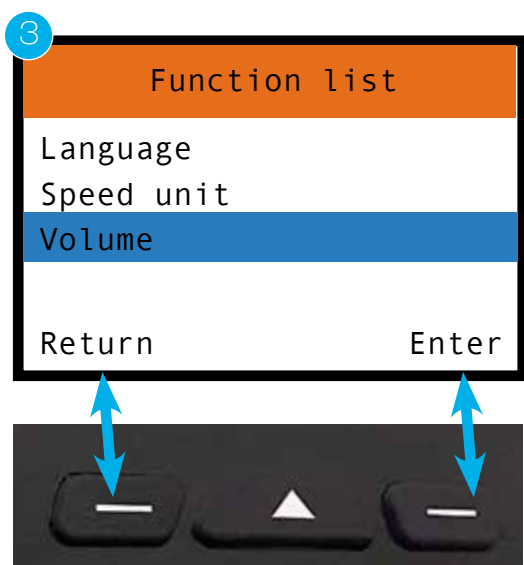

Sikkerhetsanvisninger under kjøring

Det finnes risiko for personskader dersom rullestolen velter

- Kjør aldri i stigninger eller hellinger som overskrider den maksimale tillatte stigning
- Bruk alltid tippesikringen når du kjøre med Eloflex
- Kjøring i nedoverbakker skal alltid skje i lave hastigheter.
- Unngå kjøring på glatte underlag.
- Forsøk aldri å kjøre opp eller ned trapper med stolen.
- Kjør aldri over hindringer som er høyere enn den maksimal tillatte høyden.
- Unngå raske eller ujevne bevegelser med joysticken og plutselige endringer i kjøreretningen under kjøring

Risiko for å bli stående på avsidesliggende steder.

- Har man stor funksjonsnedsettelse, bør man ikke kjøre alene langt unna bebodd område utendørs. I fare for og bli sittende fast og ikke komme seg løs.

Risiko for skader dersom en fot glir av fotstøtten og kommer under stolen i fart.

- Plasser alltid føttene på midten av fotplaten når du kjører.

Risiko for skader dersom du kolliderer med andre gjenstander i trange passasjer.

- Skal du kjøre igjennom trange passasjer, bruk det laveste hastighetsnivået

Risiko for at rullestolen kan velte dersom tippesikringene demonteres, skades eller monteres i en annen posisjon enn standard monteringen.

- Tippesikringene skal alltid være montert når rullestolen benyttes.
- Tippesikringen fungerer bare på harde underlag. På myke underlag som for eksempel gress og snø vil ikke tippesikringen fungere som dem skal.



Informasjon markert med disse symbolene er ekstra viktig. Om instruksjonene ikke følges er det en risiko for ulykke eller at din Eloflex blir skadet.

Kjøring

Les

Brukeren av stolen må lese disse sikkerhets og kjøreinstruksjonene før rullestolen tas i bruk.

Øve

- Øve: Før du benytter stolen ute blant mennesker og i butikker osv må du øve på å kjøre stolen. Det kan være lurt og øve på et flatt underlag der du har god plass, gjerne ute.
- Du kjører fremover ved å føre joysticken sakte fremover.
- Stopp ved å slippe joysticken.

Rygge

Ryggefunksjonen aktiveres ved å føre joysticken langsomt bakover. For å stoppe slipper du joysticken. Husk å alltid ha kontroll på omgivelsene dine bak deg før du rygger.

Snurre

Du kan rotere rundt ved å føre joysticken til en side og holde den der.

Svinge

Når du ønsker å svinge fører du joysticken til den siden du ønsker å svinge til. Senk alltid hastigheten når du svinger.

Hinder

Øv på å forsere og unngå hinder. Før joysticken til siden for å svinge unna hinder. Husk alltid å senke hastigheten når du nærmer deg hinder.

Rask kjøring

Trykk joysticken helt frem om du ønsker å kjøre i max hastighet. Husk å dra tilbake joysticken og senk farten om du blir usikker eller opplever hastigheten som for høy.

Kjøre over hinder

Kjør sakte frem til hinderet og påse at framhjulene står i kjøreretningen. Før deretter joysticken sakte frem samtidig som du lener deg bakover for å kjøre over hinderet.

Kjøre i bakke

Forsøk å kjøre rett opp eller rett ned når du skal kjøre i en bakke. Len deg litt frem når du kjører oppover og litt tilbake når du kjører nedover. Unngå å kjøre i for dosert veibane. Er det dosering der du kjører len deg motsatt vei. Kjør alltid sakte i dosert veibane. Unngå bakker med over 9 grader helling.

Kjøre heis

Husk å kontrollere bredden på heisdøren og hvor rask denne lukkes før du kjører inn i heisen. Du må også ta høyde for at du må rygge ut av heisen hvis det ikke er plass til å snu inne i den.

Kjøre på vei

Kjør primært på fortau og gangfelt. Finnes ikke dette bruk sykkelvei og som siste utvei trafikkert vei.

Krysse veibanen

Bruk alltid fotgjengerovergang om det er i nærheten når du skal krysse veibanen. Vær oppmerksom på kryssende biler.

Generelle sikkerhetsanvisninger

Det er alltid en risiko for personskade om Eloflex brukes til andre bruksområder enn det som beskrives i dette dokumentet.

- Bruk Eloflex kun etter de anvisninger som er beskrevet i denne bruksanvisningen (se kapittel «Typeklassifisering og beregnet bruk»)

Det finnes risiko for personskader dersom den elektriske rullestolen brukes ved nedsatte kjøreevner.

- Bruk ikke den elektriske rullestolen når dine kjøreevner er nedsatt på grunn av sykdom, medisiner eller alkohol.

Det finnes risiko for personskader dersom den elektriske rullestolen ufrivillig settes i bevegelse.

- Slå av den elektriske rullestolen ved inn- og utstigning eller om det finnes risiko for at du, noen annen person, eller noe annet skulle kunne komme i berøring med joysticken.
- Når motorene er frikoblet fungerer ikke bremsene. Derfor kan rullestolen kun skyves på et plant underlag, aldri i hellinger. La aldri rullestolen stå i eller i nærheten av helninger med frikoblede motorer.

Det finnes risiko for personskader dersom den elektriske rullestolen slås av i fart med for eksempel av/ på-knappen eller ved at en kabel slites av, fordi den da stopper med et hardt rykk.

- Slipp joysticken ved nedbremsing i en nødsituasjon. Da stopper rullestolen automatisk.

Det finnes risiko for personskader ved fall ut av stolen.

- Flytt deg ikke fremover, bøy deg ikke fremover mellom knærne og len deg ikke ut over rullestolens kanter, for å gripe etter noe.
- Bruk alltid sikkerhetsbelte og innstill det på nytt før hver tur.
- Kjør så tett inntil den nye sitteplassen som mulig ved forflytning.

Det finnes risiko for personskader dersom maks brukervekt overskrides.

- Observer den maksimale tillatte vekten (se kapittel «Tekniske data» lengst bak i dette dokument).
- Den elektriske rullestolen kan kun benyttes av en person om gangen. Bruk aldri rullestolen til å transportere flere enn en person.

Det finnes risiko for personskader og skader på rullestolen dersom låsehaken, som løses ved sammenlegging, ikke er korrekt fastlåst når rullestolen benyttes.

- Dersom rullestolens låshake ikke har klikket på plass ordentlig kan stolen plutselig falle sammen når den brukes, noe som kan føre til at du faller ut av stolen.
- Kontroller alltid at låsehaken er i korrekt posisjon før rullestolen benyttes.

Det finnes risiko for personskader og klemskader ved sammenlegging og oppfelling av rullestolen.

- Legg alltid sammen og slå alltid opp rullestolen slik som beskrevet i denne bruksanvisning.
- Vær oppmerksom på at ingen eller ingenting klemmes ved sammenlegging eller ved å slå opp.

Det finnes risiko for personskader og skader på rullestolen dersom den brukes i fuktige områder.

- Den elektriske rullestolen skal ikke benyttes ved dusjing.
- Den elektriske rullestolen skal ikke brukes til bading.



Noter at informasjon markert med disse symboler er ekstra viktige. Dersom instruksjonene ikke følges finnes risiko for ulykke eller at din Eloflex kan skades.

Sikkerhet

Krysse jernbaneskiner

Kryss alltid jernbaneskiner rett frem, aldri på skrå. Kryss aldri jernbaneskiner alene, ha alltid med noen som kan hjelpe.

Bratte bakker

Vær forsiktig når du kjører i bratte bakker fordi stolen kan tippe over. Eloflex er testet og godkjent for maks 9 graders helling. Ha alltid med noen som kan hjelpe deg.

Høye kanter

Vær forsiktig når du kjører opp eller ned en høy kant. Eloflex er testet og godkjent for kanter opp til maks 6 cm. Ha alltid med noen som kan hjelpe deg.

Forflytning

Vi anbefaler at du alltid har noen som kan hjelpe deg ved forflytning til og fra din Eloflex. Slå alltid av strømmen før du begynner forflytningen. Løft alltid opp armlenene og benstøttene innen du forflytter deg for å enklere komme inn eller ut av stolen.

Ikke reparer selv

Forsøk aldri å reparere en ødelagt elektrisk rullestol på egen hånd. Hvis du skrur eller prøver å reparere på stolen selv, gjelder ikke garantien. Kontakt alltid Eloflex, butikken eller hjelpemiddelsentralen som solgte/ordinerte stolen. Ikke modifier den elektriske rullestolen din selv.

Ikke noe leketøy

La aldri barn som normalt ikke bruker elektrisk rullestol til å sitte i eller bruke din Eloflex.

Rengjøring

Aldri rengjør Eloflex med rennende vann. Tørk av den med en fuktig klut. Dersom din Eloflex er treg å legge sammen og slå opp kan du smøre leddene med 5-56 spray eller silikonspray.

Vær oppmerksom på varme

La aldri din Eloflex stå i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde da batteriene kan ta skade. Vær aldri nær åpen flamme med din Eloflex. Du kan bruke din Eloflex fra -10 grader opp til +45 grader. Ved minus grader kan rekkevidden påvirkes.

Oppbevaring

Oppbevar din Eloflex utenfor rekkevidde for barn når den ikke brukes. Stolen bør oppbevares innendørs i frostfritt, tørt og ventilert rom. Oppbevaringstemperatur 0-30 grader.

Lader

Laderen må aldri tildekkes når den benyttes til lading av din Eloflex. Laderen blir varm og det finnes risiko for ulykke eller skade.

Batterier

Oppbevar aldri batteriene i direkte sollys ei heller på et sted som kan bli kaldere enn null grader. Batteriene skal oppbevares på et tørt, frostfritt og ventilert sted.

Teknisk data

MODEL H

Lasteveikt	43 kg uten batterier
Totalvekt	49,5 kg med batterier
Rekkevidde	40 km
Maksimal brukervekt	200 kg
Hastighet	8 km/h
Motor	2 x børsteløse motorer
Motoreffekt	2 x 400 Watt
Batteri	2 x Litium ION 20AH/24V
Batterieffekt	2 x 480 Wh
Ladetid	3 timer
Svingradius	99 cm
Hjul	foran 9" luft, bak 13" luft
Sittehøyde	54 cm
Sittebredde	51 (56, 61) cm
Sittedybde	51 cm
Ryggstøtte	Justerbart
Mål	103x66x115 cm
Mål sammenfoldet	83x66x45 cm

© Copyright Eloflex

Dette dokumentet inneholder opphavsrettsbeskyttet informasjon og kan ikke kopieres eller reproduseres helt eller delvis uten skriftlig tillatelse fra Eloflex.

Eloflex forbeholder seg retten for eventuelle typografiske feil i dette dokumentet og vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i produktene.



2021-05-08

Version 2.0

Sungo Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE

Amsterdam, Netherlands

SRN:NL-AR-000000247

Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd

No. 108 Matang Road, Penglang Town, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu

Kontakt Eloflex

Har du spørsmål eller trenger hjelp, ber vi om at du i første omgang tar kontakt med hjelpemiddelsentralen eller forhandleren din. Ønsker du å ha direkte kontakt med oss finner du kontakinformasjon på nettsiden vår, www.elflex.no.



Eloflex

Hammarbacken 4B

191 49 Sollentuna

SVERIGE