


Slik bytter du side på joysticken:



1 Ta bort joysticken ved å løsne skruen under armlenet.

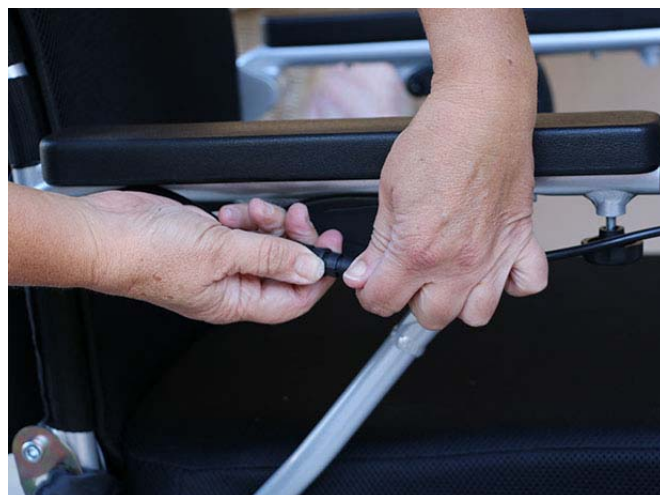


2 Løsne de to låseringene på joystick-kontakten og dra deretter forsiktig kontakten fra hverandre.



3 Klipp av stripsen under armlenet med en avbitertang. OBS! Pass på kabelen.



4 Løsne ryggtrekket ved å dra det ut og opp (det sitter fast med borrelås).

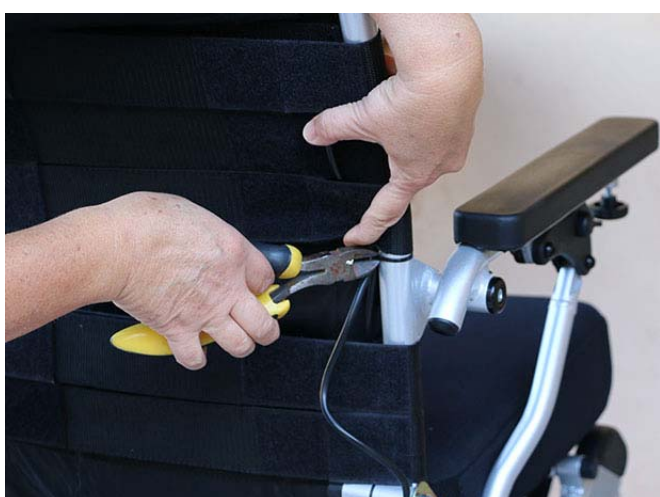

5 Klipp av stripsen på høyre ryggstolpe ved hjelp av en avbitertang. Obs igjen, pass på kabelen.



6 Dra ut kabelen til venstre for ryggen. Om du opplever att kabelen er for lang kan du snurre den en gang rundt av ryggbåndene.



7 Sett fast kabelen under venstre armlen med en strips. Vent med å dra til.



8 Ta ut plastgluggen foran på venstre armlensrør og flytt den til andre siden.



9 Ta ut festeskruen på høyre armlen og flytt den til venstre side.



10 Sett inn joysticken, koble sammen kabelen og juster deretter lengden, se bilde. stram deretter stripsen og klipp den til.



11 Du er nå klar til å kjøre din Eloflex med joysticken montert på venstre side.