


## Justering av låsehaken

Har du problem med å åpne og låse låsehaken på din Eloflex? Vil du gjøre den lettere eller kanskje tregere å låse? Ved å stramme eller slakke de to fjærene ved siden av låshaken kan du enkelt justere låsehaken. Se bilde under.

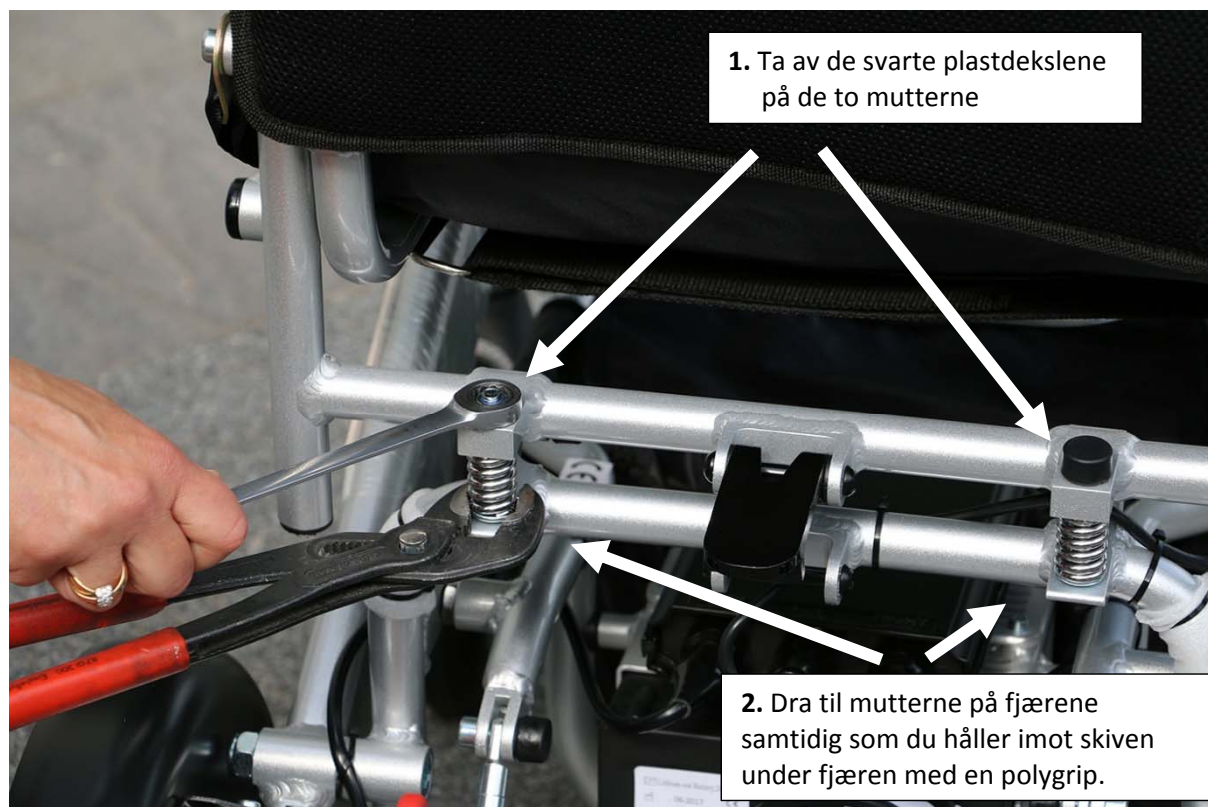

### Viktig:

Det er viktig at låsehaken på din Eloflex går tregt å dra opp og ned. Den skal gå så tregt at den kan stå rett ut av seg selv som på bildet over. Dette er viktig for at låsehaken skal stå i sin låste posisjon også dersom fjærene trykkes sammen. For å stramme låsehaken behøver du bare å dra til de to insexskruene som håller låsehaken på plass.

**Se bildet til høyre.**

