


## Tips på hvordan du enklest laster Eloflex inn i bilen.


Under har vi sammensatt den vanligste innlastingen basert på informasjon og tips fra brukere.

**1. Løfte den inn.** Den aller vanligste måten å laste inn en Eloflex er så klart å legge den sammen og deretter løfte den inn i bilen. Under presenterer vi to varianter som mange benytter, og som gir minimal belastning på ryggen takket være at man bruker benene i løftet.


**Variant 1:**

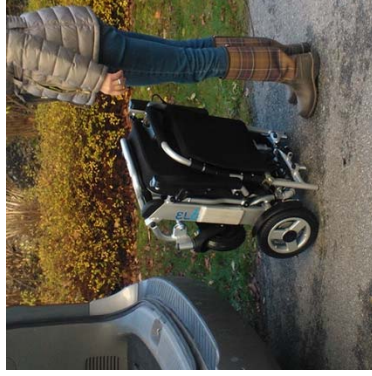


Legg sammen din Eloflex og still den med hjulene mot bilens baggasjerom

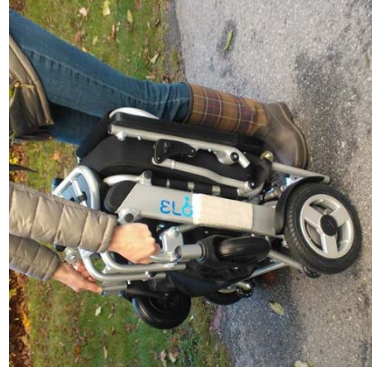

Bøy deg over stolen og ta tak med begge hendene rundt de bøyde framhjulsrørene.

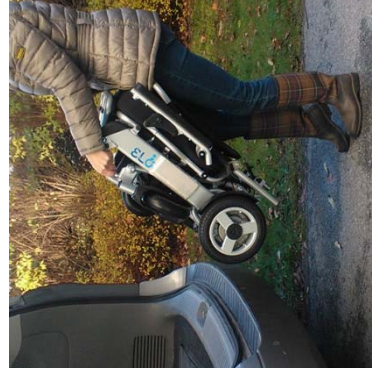

Bøy dine knær og len deg bakover. Bruk beina når du løfter opp Eloflexen til baggasje lukens kant.

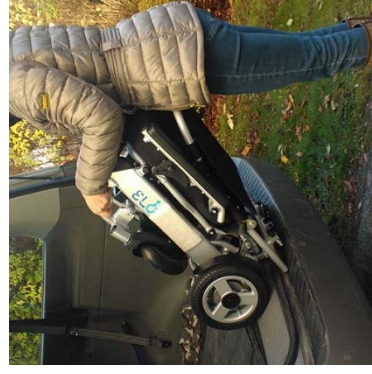

Still bakhjulene på kanten av baggasjeluken.



Tipp stolen fremover inn i baggasje rommet på bilen.

**Variant 2:**



Frikoble din Eloflex. Legg den sammen og still den med ryggen mot bilens baggasjerom.



Bøy deg over stolen og ta tak med begge hendene rundt armlens festet.



Bøy knærne dine og len deg bakover. Bruk beina når du løfter opp Eloflexens bakhjul til baggasje lukens kant.



Still bakhjulene på bilens støtfanger eller på kanten av baggasjeluken. Nå kan du rulle stolen inn i baggasjerommet.



Bytt grep. Ta tak rundt framhjulenes infestning og rull så inn din Eloflex i baggasjeromme via bakhjulene.


**2. Heve den inn.** Den kanskje beste måten å laste inn en Eloflex er å utnytte hevstangseffekten. På den måten behøver du ikke løfte mer enn en tredjedel av Eloflexens vekt. Denne teknikken krever at du har en kombi eller at bagasjelukens kant ikke er høyere enn 55 cm. Teknikken krever også at du har en Eloflex med låste tippesikringer.



Frikoble din Eloflex. Still den med fotplaten mot bilens bagasjerom.



Ta tak rundt ryggen og tipp stolen kraftig bakover. Rull stolen fremover på tippesikrings hjulene inntil fronthjulene er inne i bagasjerommet.

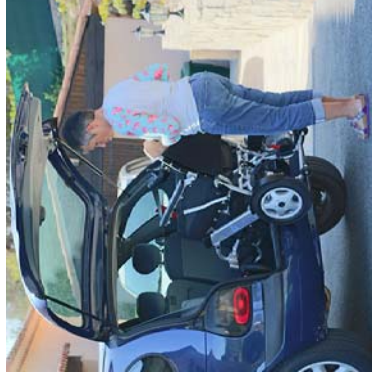

Hev opp stolen på fremhjulene ved å løfte i ryggen. Heng stolen halvveis inn i bagasjerommet ved å hvile batteriboksen mot støttfangeren.



Løse låsehaken på din Eloflex og slå den deretter sammen inn i bagasjen ved å dytte ryggen fremover.



Bytt grep. Ta tak rundt tippesikringen og skyv inn din Eloflex i bagasjerommet.


**3. Ved hjelp av rampe.** En rampe er et bra hjelpemiddel for å laste inn en Eloflex i bilen. Denne metoden er ekstra effektiv for deg som ikke orker å løfte tungt. Du kan til og med kjøre din Eloflex opp rampen i sammenlagt tilstand ved hjelp av stolens motorer.



Legg ut rampen med rett avstand mellom de to sidene.



Still stolen foran rampen med ryggen mot bilens bagasjerom. Påse at den ikke er frikoblet. Kontroller igjen at avstanden mellom rampene stemmer overens med bredden mellom bakhjulene. Legg sammen din Eloflex.

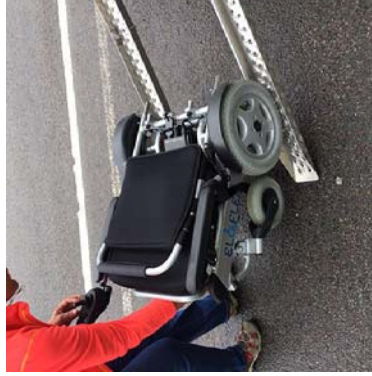

Løft stolen i framkant slik at den står på bakhjulene. Du kan nå forsiktig rygge din Eloflex opp rampen ved hjelp av joysticken. Bruk laveste hastighet og kjør forsiktig.



Når du har kommet over bagasjeromskanten kan du slå av joysticken og skyve inn stolen den siste biten.