

## Monteringsguide Eloflex:



**1** Åpne kartongen, ta ut den øvre isoporen. Legg kartongen ned. Rull ut din Eloflex av kartongen (se bildet).



**2** Ta av posen og dekkeplasten. Gjenvinn den via plastavfall.



**3** Slå opp din Eloflex ved å dra ryggen oppt og bakover. Lås haken under ryggen (se bruksanvisningen).



**4** Monter den løse kabelen på valgfri ledig kontakt på batteriet. Skru til låseringen ordentlig på kontakten.



**5** Klipp bort transportbeskyttelsen på begge sider med en saks.



**6** Fjern transportbeskyttelsen på den bakre buen over motorene ved å klippe den av med en avbitertang.






**7** Ta joysticken ut av vesken under setet.



**8** Monter joysticken på valgfri side. Dra til festeskruen slik at joysticken ikke kan beveges.

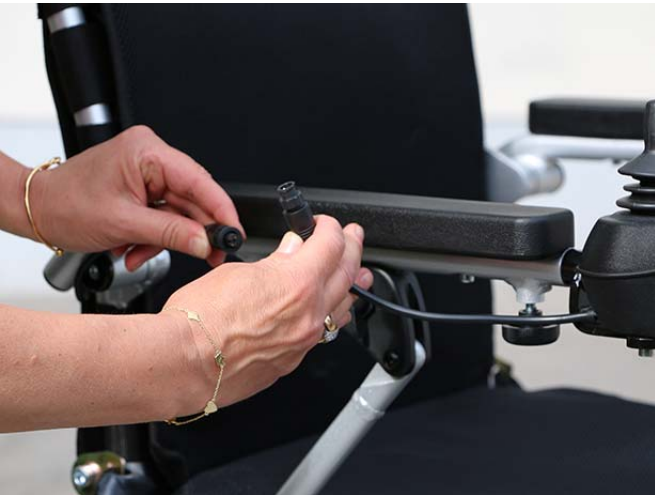

**9** Sett forsiktig sammen kontaktene på joystick-kabeln etter å ha kontrollert styresporene. Bøy ikke stiften! Skru sammen kontaktens låseringer.



**10** Pump bakhjulene på modellene L-Plus og M-Plus til 2,5 kg lufttrykk.



**11** Hvis låsehaken opplevs som treg eller vanskelig å åpne/lukke kan den justeres ved at de to fjærene dras til. Se bilde.



**12** Fotplatenes treghet kan enkelt justeres ved at de to festeskruene dras til eller løsnes. Du kan deretter låse mutteren med loctite. Se bilde.