

BRUKSANVISNING

Les gjennom hele denne dokumentasjonen før du benytter ditt Eloflex tilbehør for å være sikke på at du bruker det på en risikofri måte, og som ikke skader deg, dine omgivelser eller din elektriske rullestol.

**Eloflex
W**



EL&FLEX

Takk og lykke til!

Takk for at du har valgt Eloflex som ditt hjelpemiddel. Det betyr mye for oss ettersom vår visjon er å gjøre menneskers hverdag litt enklere og gi mennesker med bevegelseshemninger en større frihet. Vi håper du også opplever begge deler med din Eloflex.

Vi tror du kommer til å få mye glede av ditt nye tilbehør til din elektriske rullestol. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om ledsagerstyringen modell W. Vi oppfordrer deg å lese gjennom hele denne dokumentasjonen før du bruker dette tilbehøret til din Eloflex for første gang. Vi foreslår også at du trener på å kjøre Eloflex med ledsagerstyring på en åpen og plan plass før du bruker den i andre sammenhenger.

Eloflex elektrisk rullestol er konstruert for brukere med mange ulike behov. Beslutningen om hvorvidt Eloflex er egnet for brukeren tas alltid av terapeuten eller leverandøren sammen med brukeren selv. Eloflex påtar seg ingen ansvar for tilfeller der den elektriske rullestolen og dets tilbehør ikke er tilpasset brukerens behov.

En Eloflex og dens tilbehør skal i utgangspunktet brukes i sin standard utførelse. Dersom rullestolen eller dens tilbehør må tilpasses eller endres på noen måte skal det kun utføres av din hjelpemiddelsentral eller av Hjelpemiddeleksperter AS. Vær oppmerksom på at skader og feil som oppstår på grunn av at bruksanvisningen ikke følges eller på grunn av dårlig vedlikehold ikke omfattes av garantien.

Lykke til med din nye Eloflex.

Kjør forsiktig!



Innholdsfortegnelse	Side
Tiltenkt bruk	3
Montering	4-5
Kalibrere ledsagerstyringen	6
Lade instruksjoner	6
Bruk av ledsagerstyringen	7
Bruk av "split cabel"	8
Kontakt	8

Tiltenkt bruk

Typeklassifisering og tiltenkt bruk.

Eloflex elektrisk rullestol og dens tilbehør har blitt utviklet for personer som har problemer med å gå eller ikke kan gå i det hele tatt, men som har tilstrekkelig syn, motorisk- og mental evne til å styre en elektrisk rullestol.

Eloflex elektrisk rullestol er tilstrekkelig kompakt og smidig for innendørs bruk, men stolene og dens tilbehør er også egnet for utendørs bruk.

Eloflex har gjennomgått ulike tester som for eksempel EN12184:2014 – Klasse B, ISO-7176, IEC60601 og batteriene er godkjent i henhold til UN38.3. For mer informasjon les respektive elektriske rullestols bruksanvisning.

Eloflex elektriske rullestoler oppfyller relevante krav i loven (1993:584) om medisinske produkter samt forskriftene (LVFS 2003:11 og LVFS 222009:18) om medisinske produkter. Produktet oppfyller også kravene i EUs direktiv om medisin-tekniske produkter, 93/42/EØF og 22007/47/EG.

Samsvarserklæring/ CE- merking i henhold til klasse 1 har blitt utført i henhold til det medisinske direktiv 93/42/EØF/ MPG (medisinske produkters lov) og gjelder kun det komplette produkt. CE-merket blir ulovlig dersom man benytter komponenter eller tilbehør som ikke har blitt godkjent for dette produktet.

Behov

Meningen med Eloflex elektrisk rullestol er å kompensere for en skade eller et funksjonshinder, derfor anbefales den under følgende omstendigheter:

- Dersom brukeren har problemer med å gå eller sterke problemer med å gå, noe som gjør det vanskelig å forflytte seg i egen bolig.
- Dersom det finnes behov for å forlate boligen for å komme seg ut eller for å besøke de stedene som man normalt har besøkt for å utføre hverdagslige aktiviteter.
- Når brukeren har problemer med å komme seg til, eller utføre arbeid eller aktiviteter på grunn av sin bevegelses-hemming.

Det er mulig å bruke Eloflex og dens tilbehør både inne- og utendørs.

Bruksanvisning elektrisk rullestol

Les alltid gjennom bruksanvisningen til din elektriske rullestol før du bruker dette tilbehøret. Der finner du viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold.

Bruk

Bruk kun Eloflex og dets tilbehør når den er i funksjonell tilstand. Hvis ikke utsetter du deg selv og andre for økt risiko. Kontakt din hjelpemiddelsentral eller leverandør dersom du oppdager feil og mangler på din Eloflex og dens tilbehør.

Garanti

Det gis ett års garanti på tilbehør til Eloflex. Garanti vilkårene er i tråd med de gjeldende nasjonale og generelle virksomhetsregler og lover.



Montering

Den intuitive ledsagerstyringen passer på alle elektriske rullestoler fra Eloflex med serienummer EL161400 eller høyere (Solgt etter April 2018).

Dersom din Eloflex har en styreboks som ser ut som den på bildet, vil ledsagerstyringen passe til ditt produkt.



Løsne kabelen

Step 1

Start med å sku fra hverandre kontakten til styreboksen under armlenet.



Step 2

Ta bort styreboksen og oppbevar den hjemme eller i vesken under sete avhengig av hvilken Eloflex-modell du har.



Step 3

Klipp av eventuelle strips lengst inn på armlenet for å frigjøre kabelen.

Montering

Monter festet

Monter ledsagerstyrings feste på respektiv side av ryggen i henhold til bildene.

Step 1

Åpne festet ved å skru ut rattet.

1



2



Step 2

Sett feste på plass på den respektive side med rattet skrått bakover og stram det løst.

3



Step 3

Sett bøylen i respektive feste og stram rattene.

Monter ledsagerstyringen

Step 1

Åpne klemmen på håndtakets bakside. Hold håndtaket under bøylen og stram klemmene rundt røret.

1



2



Step 2

Stram skruespaken på klemmen løst.

Step 3

Vinkle opp styrehåndtakene til vannrett posisjon og stram deretter til skruespaken hardt.

3



4



Step 4

Monter kabelen med ledsagerstyringsens kontakt.

VIKTIG! Påse at stiften i kontakten ikke bøyes.

Kalibrere ledsagerstyringen

Etter at ledsagerstyringen er montert og tilkoblet, må det kalibreres.

Hold inn det gule sikkerhetsgrepet på håndtaket (1) samtidig som start knappen trykkes inn (2). Lyset på skilpadden (3) begynner nå å blinke langsomt. Fortsett å holde sikkerhetsgrepet inntil lyset på skilpadden begynner å blinke hurtig. Slipp så sikkerhetsgrepet og vent til lampen slutter å blinke.

Nå er ledsagerstyringen kalibrert og klar til bruk.



Lade instruksjoner

Slik lader du:

Slå av din Eloflex (Alle lys på ledsagerstyringen skal være slukket)

Koble til laderen i uttaket på ledsagerstyringen (Du finner det under kjørehåndtakene). Kontroller at kontaktens posisjon stemmer overens. Sett deretter inn laderens nettkabel i egnet stikkontakt.

Lading indikeres med en lampe på laderen. Rødt lys betyr at lading pågår. Etter ca tre timer er batteriene ladet til 90 prosent. Stolen kan nå benyttes igjen.

Etter ca 5-8 timer blir lampen på laderen grønn og batteriene er fullt oppladet. Under ladingen blir selve laderen varm, men dette er helt normalt. For maksimal levetid på batteriene bør lading skje i ca fem timer og vi anbefaler at du kobler fra laderen når batteriene er full ladet.



VIKTIG!

**Koble
ALDRI
laderen
direkte
til batteriet.**

Du bør lade batteriene når kun en gul og en rød lampe lyser på batteriindikatoren. Batteriene tar ikke skade av å lades ofte, selv om flere lamper lyser.

Lading av batteriene kan skje ned til -10 grader. Batteriene vil ikke bli fulladet ved lading i lavere temperaturer. I -10 grader kan kjørelengden reduseres med 50%.


Bruk av ledsagerstyringen

PÅ og AV: Slå på med knappen på ledsagerstyringen. Når stolen ikke benyttes slår man den av med strømbryteren på ledsagerstyringen.

Lav hastighet: Vi anbefaler at man kobler ut «Lav fart» hastigheten ved å trykke på knappen med skilpadde symbolet slik at lampen slukker.

Sikkerhetsgrepet: Trykk inn det gule sikkerhetsgrepet (død manns knappen) med en eller to hender og begynn å gå fremover. Stolen vil nå følge bevegelsene til den som holder i håndtaket. Dersom man slipper sikkerhetsgrepet stopper stolen umiddelbart.

Trykk løst: Hold bare lett i håndtaket. Den som holder i håndtaket skal ikke skyve stolen kun styre den. Det er stolens motorer som skal gjøre jobben. Det trengs ingen kraft for at stolen skal følge bevegelsene til den som holder i styrehåndtaket.

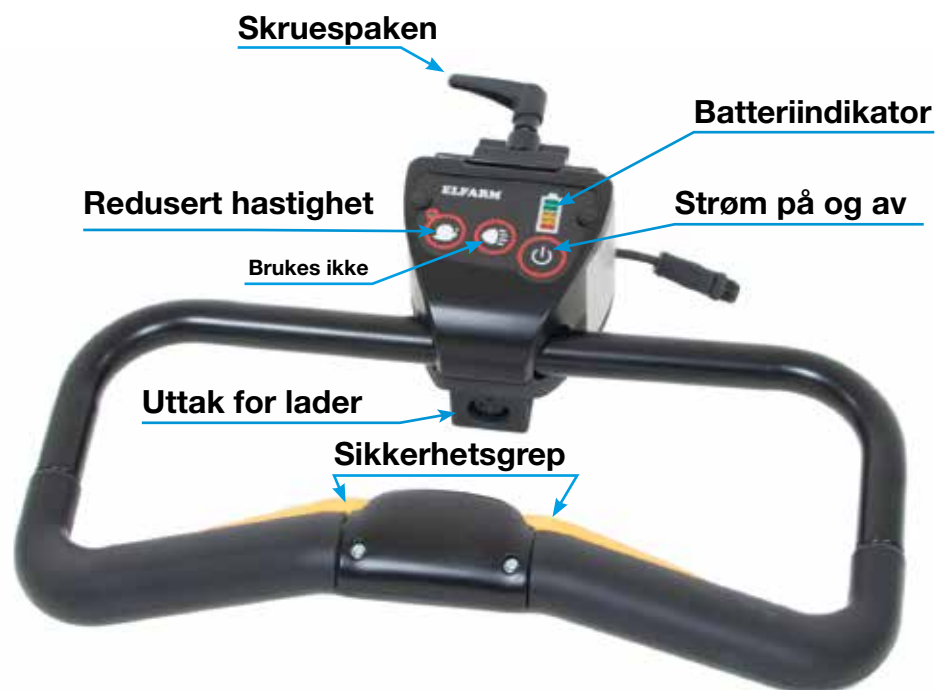

Svinge: Gå til venstre eller høyre dersom du vil svinge så følger stolen med.

Hastighet: Gå raskere eller saktere så tilpasser stolen sin hastighet etter den som holder i håndtaket.

Rygge: Dersom du vil rygge, går du bakover samtidig som du trekker håndtaket lett bakover.

Bremse funksjon: Dersom du går nedover bremses stolen automatisk og tilpasser seg samme hastighet som den som går bak.

Temperaturkompensering

Håndtaket har innebygd kompensasjon for temperaturforskjeller noe som innebærer at det selv kompenserer for store temperatur svingninger. Dersom ledsagerstyringen ikke oppfører seg som den skal ved store eller raske

temperatur variasjoner (hvis man går fra veldig kald ute temperatur til varm inne temperatur) kan det være nødvendig å kalibrere ledsagerstyringen på nytt. Se side 6.



VIKTIG!

Man skal absolutt ikke bruke styrehåndtaket som kjørehåndtak når stolen er slått av.

Man skal ikke skyve stolen ved hjelp av ledsagerstyringen når den er frikoblet.


Dersom du skal sjekke inn din Eloflex på fly, må du først ta bort ledsagerstyringen og legge det i reisevesken.

Bruk av delt kabel "Split cabel"



Ved hjelp av vippebryteren kan du bytte mellom å styre med styrespaken eller med W-håndtaket.

For W-håndtak

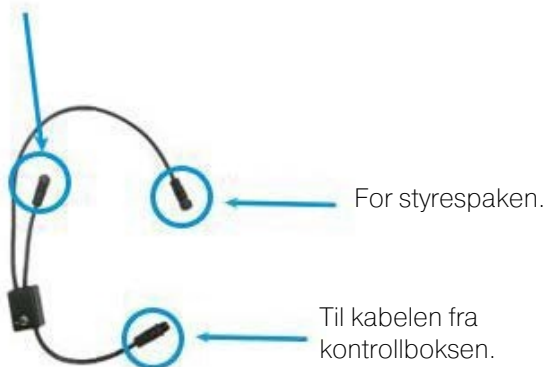

Kabelen festes på passende steder ved hjelp av kabelbindere.

© Copyright Eloflex

Dette dokumentet inneholder opphavsrettslig beskyttet informasjon og den skal ikke delvis eller helt kopieres eller distribueres uten skriftlig tillatelse fra Eloflex.

Eloflex reserverer seg for eventuelle skrivefeil i dette dokument og vi forbeholder oss retten til produktendringer.

Hjelpemiddeleksperter AS

Vassbygdeveien 42

7512 Stjørdal

Telefon: 906 86 881

www.h-e.no



Kontakt Eloflex

Dersom du har spørsmål eller behøver hjelp ber vi deg først ta kontakt med din forhandler eller hjelpemiddelsentral. Dersom du vil ha direkte kontakt med oss finner du kontaktinformasjon på vår hjemmeside www.eloflex.se. På hjemmesiden finnes også en spesifikk support side der du blant annet finner vanlige spørsmål og svar. Adressen er www.eloflex.se/fag

EL&FLEX

Eloflex

Hammarbacken 4B

191 49 Sollentuna

SVERIGE

Telefon: +46 (0)10-18 33 100

E-post: info@eloflex.se

Webb: www.eloflex.se