

EL&FLEX


**Instruktion av vårdarstyrning Eloflex A Kit
Artikelnummer 7350006083204**



Ingående delar Eloflex A Kit. (7350006083204)



- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Eloflex A Tumjoystick | (7350006083174) |
| 2. Eloflex A Joystick | (7350006083198) |
| 3. Eloflex A Handtag Hö/Vä | (7350006083181) |

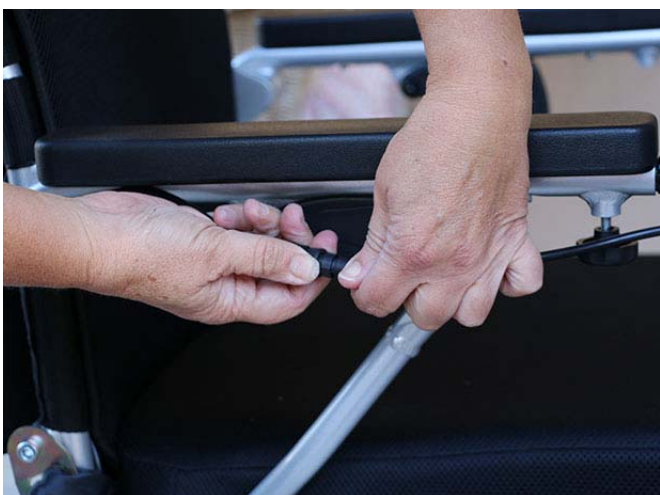


1 Lossa de två låsringarna på joystick-kontakten och dra sedan försiktigt isär kontakten.



2 Vinkla upp armstödet, skruva sedan ut de två skruvarna som fäster joysticken. Montera den nya i motsatt ordning.



3 Montera handtagen genom dra det två skruvarna enligt bilden, klämmorna ska monteras över tyget.

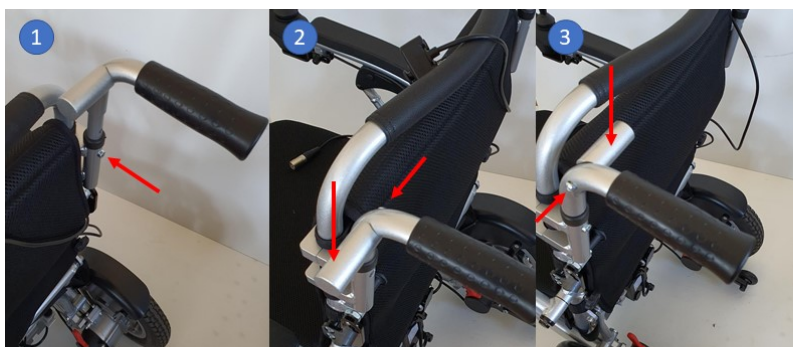

4 Styrning på vänster eller höger sida. Ta bort bort styrenheten, flytta sedan delarna i bildernas turordning. Till sist återmonteras styrenheten.



5 Justera handtagets höjd genom att lossa skruven enligt bilden.



6 Nu när allt är monterat ansluts kontakten från vårdarstyrningen i joystickens laddringång.

Joystick kompatibel med Eloflex A vårdarstyrning

Från och med April 2021 lanserar Eloflex en ny modell av vårdarstyrning. Med den nya modellen av vårdarstyrning ingår en ny joystick. Se nedan för förklaring av knapparna och indikatorernas funktion och betydelse.



1. Batteriindikator

Här indikeras hur mycket ström det finns kvar i batterierna. Batteriindikatorn består av fem gröna lampor. När batterierna är fulladdade lyser samtliga lampor. Allt eftersom batterierna töms slocknar lamporna i tur och ordning. Vi föreslår att du laddar när tre av de nio lamporna återstår.

2. Strömbrytare

Med denna knapp sätter du på och stänger av din Eloflex. Vänta alltid några sekunder innan du kör iväg efter att du satt på din Eloflex. Tänk på att din Eloflex skall vara avstängd när du laddar den.

3. Minska hastigheten

Med hastighetsväljarens minusknapp minskar du maxhastigheten. Vald hastighet indikeras med den gula indikatorn mellan minus och plusknapparna. Det finns fem hastigheter. När en gul lampa lyser står Eloflex i sitt långsammaste läge. När alla fem gula lamporna lyser är Eloflex i sitt snabbaste läge.

4. Öka hastigheten

Med plusknappen ökar du Eloflexens maxhastighet. Se punkt tre ovan.

5. Tuta

Tryck för att påkalla uppmärksamhet.

6. Kontrollspak (joystick)

Med denna spak kontrollerar du stolens färdriktning och hastighet. För spaken framåt för att börja köra framåt. För spaken bakåt för att backa och för spaken i sidled för att svänga.

7. Lyse

Med denna knapp sätter man på och stänger av joystickens lyse.

Vårdarstyrningen och joystickens funktion



Vårdarstyrningen manövreras med en knapp (1) och styrspaken (2).

- Tryck en gång på startknappen (1) för att aktivera vårdarstyrningen.
- Ändra rullstolens hastighet som indikeras i med gula lampor på joysticken (3) i fem steg genom att trycka snabbt på startknappen (1). Hastigheten ökas ett steg per tryckning.
- Manövrera rullstolen med styrspaken (2).
- Stäng av rullstolen genom att hålla inne startknappen (1) i 3 sekunder.

Notering! Omprogrammering av stolens köregenskaper görs enligt befintliga instruktioner, den nya joysticken har 5 st gröna indikatorlampor till skillnad från 8 st på originaljoysticken. Använd nedandstående tabell för att utläsa lampornas kombination (8 steg).

Parameter	Orginaljoystick	Eloflex A joystick
1	1 LED fast ljus	1 LED fast ljus
2	2 LED fast ljus	1 LED fast ljus och 1 LED blinkande
3	3 LED fast ljus	2 LED fast ljus
4	4 LED fast ljus	2 LED fast ljus och 1 LED blinkande
5	5 LED fast ljus	3 LED fast ljus
6	6 LED fast ljus	3 LED fast ljus och 1 LED blinkande
7	7 LED fast ljus	4 LED fast ljus
8	8 LED fast ljus	5 LED fast ljus